

## ASKINA® HEEL

# APÓSITO HIDROCELULAR MULTICAPA NO ADHESIVO ANATÓMICO DE TALÓN

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Askina® Heel** es un apósito estéril de espuma de poliuretano hidrófila, no adhesivo, anatómico de talón, para la prevención y tratamiento de heridas.

El apósito está compuesto por:

1. Capa externa color rosa de film de poliuretano impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambio de gases.
2. Capa blanca suave en contacto con la herida de espuma de poliuretano densa de alta absorción.
3. Tira almohadillada para la fijación del apósito (de uso opcional).



**Askina® Heel**, gracias a su espuma de alta densidad, posee una gran capacidad de reducción de la presión sobre prominencias óseas (talones, codos y maléolos) contra las superficies de apoyo.

Su elevada capacidad de absorción y retención del exudado evita la maceración de la piel perilesional protegiendo la herida y manteniendo las condiciones óptimas para su cicatrización.

Su especial diseño, con una superficie total efectiva de 225 cm<sup>2</sup> permite proteger todas aquellas

superficies susceptibles de padecer los efectos de una presión constante, incluyendo los maléolos.

Su exclusivo sistema de fijación (opcional) permite su fácil colocación, monitorización y posterior recolocación, incrementando la rentabilidad del apósito.

Es compatible en combinación con otros productos tales como aceites, cremas protectoras, así como otros productos destinados a la cura en ambiente húmedo.

### INDICACIONES

**Askina® Heel** está indicado en el tratamiento y prevención de úlceras por presión y otras lesiones crónicas de la piel localizadas en el talón, maléolos o codos.

### INSTRUCCIONES DE USO

**Askina® Heel** es muy fácil de aplicar, no se precisan habilidades o equipos especiales. El intervalo entre cambios de apósitos dependerá del estado de la lesión.

#### a) Preparación de la piel

- Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (Prontosan®) o solución salina en su defecto.
- Secar la piel alrededor de la lesión.

#### b) Aplicación del apósito

- Abrir el sobre de Askina® Heel y aplicar sobre el talón (1).
- Askina® Heel se puede sujetar usando la tira de seguridad proporcionada (2) (correa de espuma y dos broches autoadhesivos) o fijarse con un apósito secundario adecuado por ejemplo una venda de fijación o compresión (3).

**Askina® Heel** puede mantenerse de 24 horas hasta 7 días, dependiendo de la cantidad de exudado de la lesión. Si se producen fugas, se debe cambiar el apósito inmediatamente.

### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN


Conservar en lugar fresco y seco.

Caducidad: 3 años des de la fecha de fabricación.

**Marca CE**

**Producto libre de látex.**

### PICTOGRAMAS

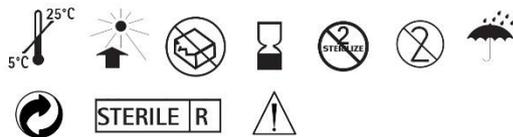

### PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun	Código EAN	Medidas embalaje
Askina® Heel	C/ 3 uds	WIN7240103	16941094089261	25 x 24,8 cm

Importado por B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Alemania  
Distribuido por B. Braun Medical, S.A.U. | División OPM | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Tel. 93 586 62 00 | Fax 93 588 10 96 | [www.bbraun.es](http://www.bbraun.es)