



**INTERSURGICAL**  
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES

# CIRCUITOS DE ANESTESIA PEDIÁTRICOS CON VÁLVULA APL

## VÁLVULA APL PEDIÁTRICA

El exclusivo diseño de la válvula pediátrica permite ventilar al paciente con parámetros fiables, de acuerdo con las normas ISO 8835:

- La resistencia al paso del flujo es inferior a 1 cm H<sub>2</sub>O.
- En ningún caso se rebasará una presión de 35 cm H<sub>2</sub>O, con lo que se evitan las posibles lesiones por barotrauma.



Válvula APL pediátrica

Flujo L/min.	4	6	8	10	12	15
Max. presión generada en cm H <sub>2</sub> O con la válvula cerrada	27	28	30	31	32	35

- En la transición desde la posición abierta a la posición cerrada la presión generada es progresiva, con posiciones intermedias, de modo que se alcanza de manera gradual y para cada flujo la presión máxima tolerada.

## RECOGIDA SEGURA DE GASES

La válvula tiene una salida estándar de 30 mm a la que se puede adaptar un conector con un tubo para la recogida de los gases anestésicos espirados.

## BAJO PESO

Que facilita al médico la manipulación del sistema y al paciente le evita una posible lesión por tracción del tubo endotraqueal.

## BAJA COMPLIANCE

Con arreglo a la normativa ISO 5367.

## TRANSPARENTE

Hace posible la visualización del interior del tubo previniendo una posible obstrucción del mismo.

## DISPONIBLES VERSIONES COMPATIBLES CON PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (MRI)



I2122



I2123





REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I2122	Circuito de inducción Mapleson F de 1.8 m con balón de 0.5 L	15
I2122007	Circuito de inducción Mapleson F para MRI de 3.2 m con balón de 0.5 L.	5
I2122010	Circuito de inducción Mapleson F de 1.8 m con balón de 1 L.	15
I2123	Circuito de inducción directo de 1.8 m con balón de 1 L.	15
I2124	Circuito de inducción universal de 1.8 m con balón de 0.5 L.	15
I2126	Circuito de inducción universal de 1.8 m con balón de 1 L.	15
I2126001	Circuito de inducción universal para MRI de 3.6 m con balón de 1 L.	10





**INTERSURGICAL**  
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES

# CIRCUITOS DE ANESTESIA PEDIÁTRICOS CON VÁLVULA APL

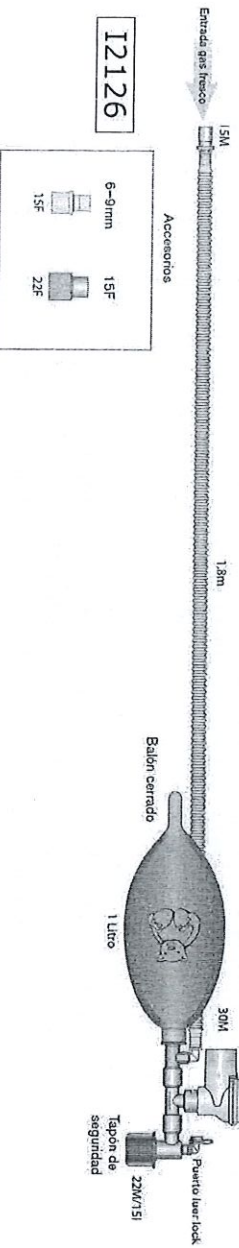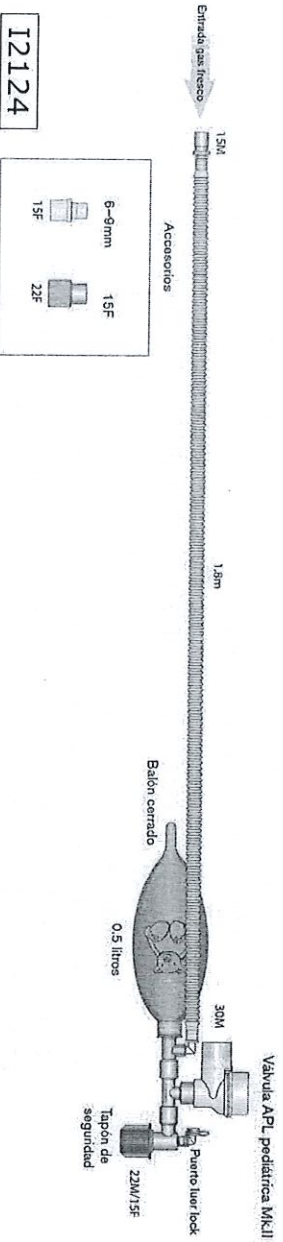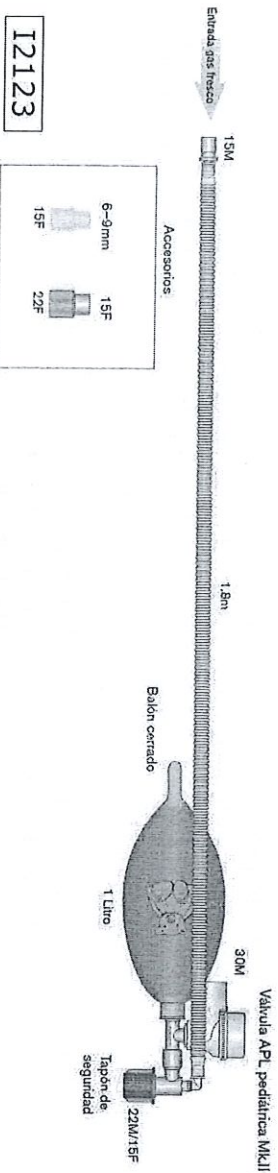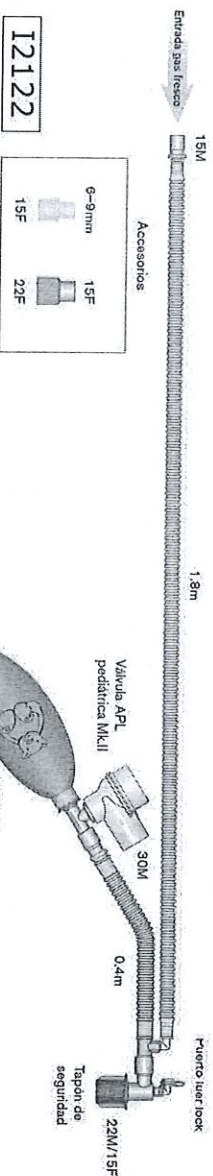

INTERSURGICAL  
C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid)  
Tel.: 91 665 73 15 Fax: 91 685 50 99  
E-mail: mail@intersurgical-es.com  
Web: www.intersurgical.es

**INTERSURGICAL**  
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES