


Apósitos de espuma de poliuretano con Tecnología Safetac para Talón

- Minimiza el dolor y el traumatismo durante los cambios de apósito^{1,2}
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión
- Suave adherencia con una mejorada capacidad de permanencia y comodidad
- Con su exclusiva forma se adapta al talón perfectamente

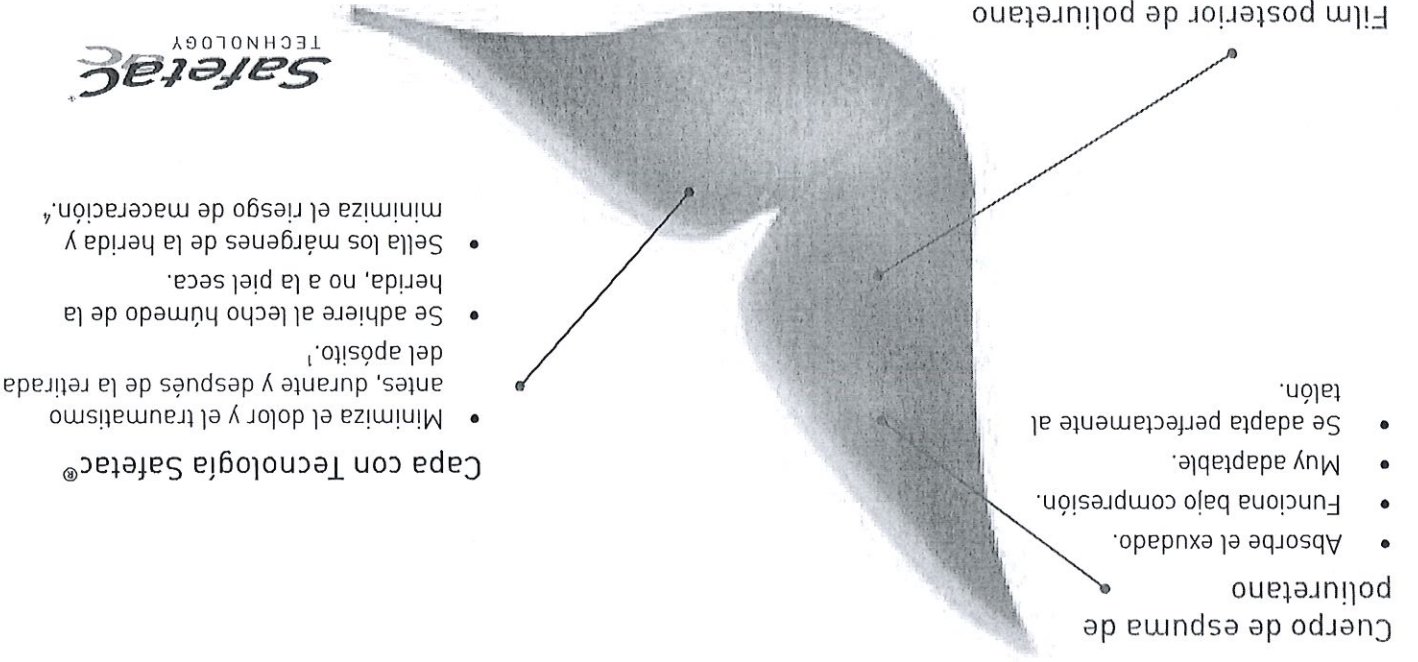

*Microbios mayores de 25 nm


Tecnología Safetac®

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que sella herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es




Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

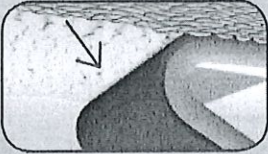

Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


Modo de utilización Mepilex® Heel

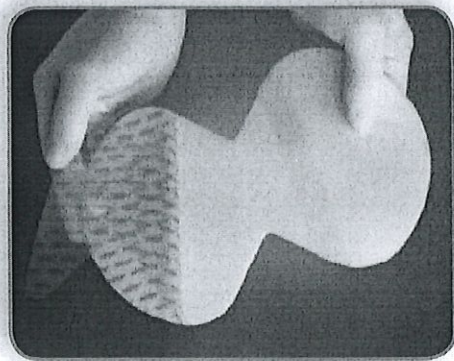

Limpiar la herida y retirar el papel protector.



Mepilex Heel debe cubrir al menos 2 cm de piel perilesional. Aplicar la cara adherente sobre la herida. No estirar.

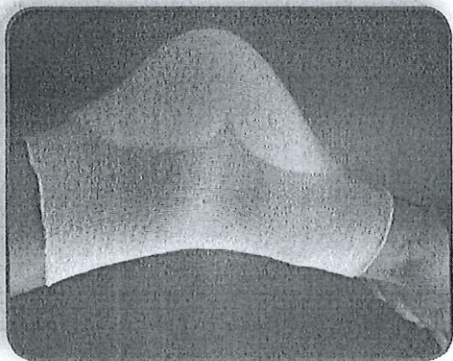


Si fuera necesario, asegurar Mepilex Heel con un vendaje u otra fijación.

Cómo funciona Mepilex Heel

Mepilex Heel es un apósito de espuma suave y muy adaptable diseñado para la zona del talón. Absorbe el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo de la lesión. La capa Safetac sella los bordes de la herida, previniendo la expansión del exudado hacia la piel perilesional, esto minimiza el riesgo de maceración. La capa Safetac asegura que el apósito pueda cambiarse sin dañar la lesión o la piel perilesional o exponer al paciente a un dolor adicional.

Beneficios de Mepilex Heel


- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito.
- Su nivel de adherencia hace que el apósito permanezca en el sitio y facilita la aplicación de vendajes compresivos o de retención.
- Se puede usar bajo vendaje compresivo.
- Gracias a su exclusivo diseño se adapta perfectamente al talón.
- Proporciona confort al paciente durante su uso.
- Puede mantenerse en su sitio durante varios días, dependiendo de las condiciones de la herida.
- Puede retirarse y ajustarse sin perder sus propiedades adherentes.
- Hipoalérgico.

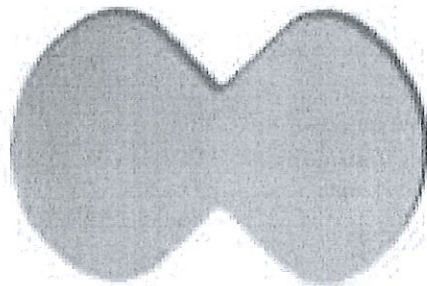

Financiado
S.S.

PRESENTACIONES MEPILEX® TALON	C.N.	Tamaño cm	Uds/ env.	Uds/ TRP.	Sobres estériles
400105	13 x 21	3	15		

PRESENTACIONES MEPILEX® HEEL	nº Ref.	Tamaño cm	Uds./env.	Uds./TRP.	Sobres estériles
288100	13 x 20	5	25		

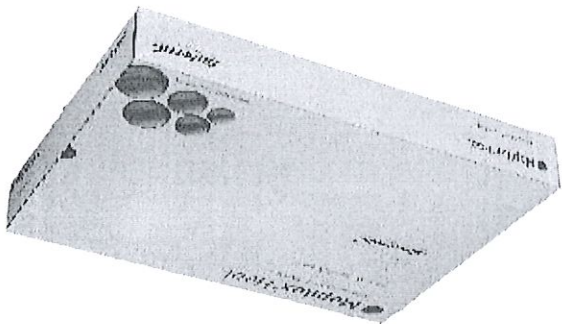

Indicaciones

Mepilex Heel está diseñado para el manejo de heridas con un nivel de exudado entre bajo y moderado. Mepilex Heel puede usarse con vendajes compresivos. Para más detalles, por favor, consulte las instrucciones de uso.